

ガイドワイヤ挿入コネクタ

H-FLOW VALVE

製品番号：270804


製品名：エイチフローバルブ

医療用嘴管及び体液誘導管 JMDNコード:70286000 医療機器製造販売届け品目番号:13B2X00021000002 JANコード：4580292400014

自己密閉止血フローバルブ


- ・ガイドワイヤを挿入する手技において カテーテル等のコネクタ部に接続してガイドワイヤの挿入を補助します
- ・カテーテル側は オススルー 反対側 “アクセスキャップ” を外すとメススルー形状となっております
- ・内部に “スリット入り隔壁” が内蔵され通常はスリットが閉まった状態です
- ・“スリット入り隔壁” のメススルー側に “アクチュエータ” が内蔵されており 付属の “アクセスキャップ” もしくは ガイドワイヤで圧迫されることにより 隔壁のスリットが解放し ガイドワイヤの通過が可能となります
- ・ガイドワイヤが通過している際 “スリット入り隔壁” がガイドワイヤとの隙間を塞ぎ挿入中カテーテルからの液体の漏れを防ぎます

構造と名称

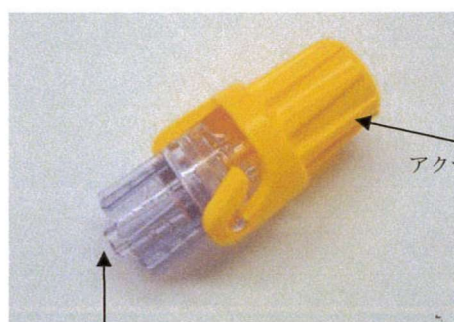


オススルーコネクタ

アクセスキャップ

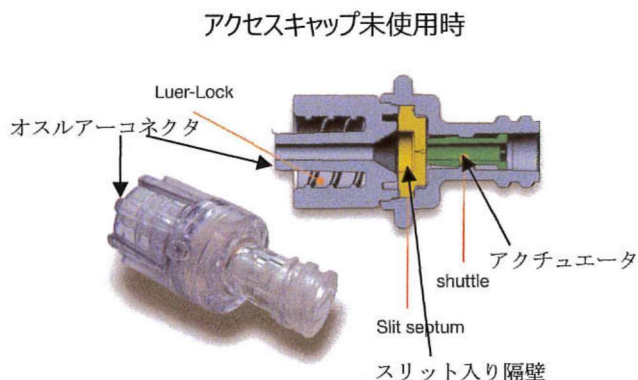

アクセスキャップ未使用時

アクセスキャップ使用時

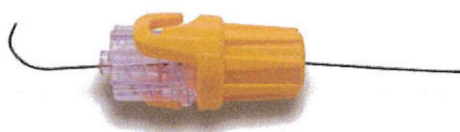

ガイドワイヤ付属 インサーター使用時



- ・ガイドワイヤ付属のインサーターを使用する場合は アクセスキャップを取り外してください
- ・本品は Disposable 製品であるので再使用は行えません
- ・使用中の破損 接続部のゆるみ及び液漏れ等について 定期的な確認をしてください
- ・コネクタ部の過度の締め付けは破損の原因になります
- ・ひび割れが生じた場合は 直ちに新しい製品と交換してください

適合ガイドワイヤ：0.014"～0.038" ・包装 出荷単位：個包装/25 個/箱 ・エチレンオキサイトガス滅菌済み

お問合せ： 株式会社ユーシンメディカル

東京都文京区本郷 2 丁目 2 6 - 3 本郷松崎ビル 4 階

TEL：03-5844-1415

FAX:03-3815-5782

