



ユーシン トレイキット 低床用 標準Gタイプ

(トレイ型完全閉鎖式導尿キット)

ラテックスフリー



◆業務の効率化

カテーテル留置に必要な消耗品・器具が無菌状態でセットされており、速やかに手技が行えます。

◆ラテックスフリー

生体に優しいオールシリコンフォーリーカテーテルをはじめ、留置に必要な物品すべてがラテックスフリーですので、安心してご使用頂けます。

◆尿路感染防止

完全閉鎖式の採用により、細菌の侵入を防止し、尿路感染防止に有効です。

特定保険医療材料請求名

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2)2管一般(Ⅱ)②閉鎖式導尿システム



本製品のバルーンカテーテルサイズは12~24Fr、バルーン容量は全サイズ最大容量10mlとなっております。

◆手袋・・・1組

ニトリル製ですのでラテックスアレルギーの心配がありません。又、パウダーフリーとなっております。

◆綿球・・・3個

綿の毛羽立ちが少ない日本製の物を採用。

◆ガーゼ・・・2枚

200mm×280mmと十分な大きさです。

◆シーツ(包み用、処置用)・・・各1枚

緑面が撥水仕様、白面が吸水仕様となっております。

◆固定用テープ・・・2枚

カテーテル固定にご使用下さい。

◆ピンセット・・・1本

先端に角度を付け、綿球の保持力を高めました。

◆滅菌精製水入りバルーン拡張器・・・1本

滅菌済みの精製水が10ml充填されています。

◆潤滑ゼリー・・・1袋

水溶性潤滑剤で、5g入りです。

◆消毒液・・・1袋

ポビドンヨード消毒液10%が、15ml入りです。

◆トレイ・・・1個

任意の部分に消毒液等を入れて、ご使用下さい。



●X線造影ライン入り EOG滅菌済

再使用禁止

製品番号	サイズ(外径mm)	バルーン最大容量	カラーコード	全長	箱入数	ケース入数	JANコード
TSG1002-12	12Fr(4.0)	10ml	白	400mm	5セット/箱	6箱/ケース	4580292406293
TSG1002-14	14Fr(4.7)		緑				4580292406309
TSG1002-16	16Fr(5.3)		橙				4580292406316
TSG1002-18	18Fr(6.0)		赤				4580292406323
TSG1002-20	20Fr(6.7)		黄				4580292406330
TSG1002-22	22Fr(7.3)		紫				4580292406347
TSG1002-24	24Fr(8.0)		青				4580292406354



オールシリコンフォーリー バルーンカテーテル

- 滑らかで、柔軟性に優れています。
- 生体適合性に優れた材質です。
- 未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、安心してご使用できます。



ニードルレス採尿ポート

- 採尿取口はニードルレス採尿ポートを採用。
- 針刺し事故を防止でき、針不要のため、コスト軽減にもつな갑니다。
- ポート洗浄は容易にできます。



カテーテル採尿バッグ接続部

- カテーテルと採尿バッグの接続部はシールされており、細菌の侵入を防止できます。



ドリップチャンバー

- 逆流しにくい二段構造になっております。



導尿チューブ

- 太く折れ曲がりにくいチューブです。
- チューブ内のリブ加工(ライン入り)により、採尿バッグ内の空気抵抗を軽減。又、キンクしても尿が流れる構造になっております。



採尿バッグ 低床用 (2300ml)

- 低床用ベッドに対応した2300ml容量の採尿バッグです。
- 排尿口を中央部にすることで、固定時のバッグ傾きを抑えました。



排尿口

- 排尿口を上向きに収納できる事により、床からの汚染リスクを軽減します。



排尿コック

- 片手操作により、簡単な開閉が可能です。
- 排尿口先端は、斜めカットを入れたプラスチック製の為、尿飛散が低減されます。

総販売元

株式会社 ユーシンメディカル

〒113-0033 東京都文京区本郷2-26-3

TEL 03-5844-1415

FAX 03-3815-5782

URL <http://www.yushinmed.co.jp>

販売業者