

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
単回使用気管内チューブスタイレット

37469000

再使用禁止

スタイレット


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 使用前の滅菌包装に破損、水濡れ等の異常が認められる場合は使用しないで下さい。
3. 経鼻挿管する際は、使用しないで下さい。

【形状・構造等】

本製品は、気管内チューブ専用のスタイレットで、可動式のストッパーを具備しています。

(形状)

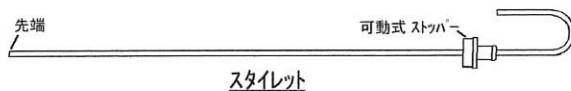

【性能、使用目的・効能又は効果】

1. 性能、使用目的
 - 1) 気管内チューブの内腔に挿入して、一時的に気管内チューブを気道に挿管しやすい形状に保つために使用します。
 - 2) 滅菌済みであるので、そのまま直に使用できます。
2. 性能、使用目的に関連する使用上の注意
弊社気管内チューブを、経口挿管する際の補強等、形状を保つ目的以外には使用しないで下さい。

【操作方法、使用方法】

1. 滅菌包装より丁寧に取り出し、破損等がないことを確認して下さい。
2. 気管内チューブに挿入する際は、本製品の先端が、気管内チューブ先端より 20mm 程引き込まれた状態になるよう、ストッパーを調節してください。(突出した状態で挿管すると、気管損傷等の原因となります。)
3. 気管内チューブを挿管する際は、気管内チューブのスリップジョイントと本製品のストッパーを持って挿管して下さい。(本製品のみを持って挿管すると、先端部が気管内チューブより突出し、気管損傷等の原因となります)
4. 気管内チューブを挿管した後は、直ちに気管内チューブより抜去し、廃棄して下さい。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本製品はディスポーザブル製品です。一回限りの使用のみで再使用しないで下さい。 *
 - 2) 極端に折り曲げたり、切断等の追加加工はしないで下さい。
 - 3) 刃物、鉗子、針等による傷には十分注意し、傷が生じている(生じた)場合は使用しないで下さい。
 - 4) 滅菌包装を開封した後、何らかの事情で使用しない場合は廃棄して下さい。

2. 不具合・有害現象

本製品の使用に際し、以下のような有害事象が生じる可能性があります。

- ・ 下咽頭、喉頭又は気管の損傷や穿孔

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - ・ 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿な場所を避けて清潔な状態で保管して下さい。
2. 有効期間・使用期間
 - ・ 適正な保管方法を保たれていた場合、個包装に記載の使用期限を参照して下さい。[自己承認(当社データ)による]
 - ・ 保管には、十分注意し使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】

5本/箱

【製造販売業者の氏名及び住所等】

株式会社ユーシンメディカル

住所 : 東京都文京区本郷2丁目26番3号

TEL 03-5844-1415 FAX 03-3815-5782

輸入先 : Yushin Medical Co.Ltd

国名 : 大韓民国