

ユーシン レッグバッグ

逆止弁付 500ML



本製品は
身体装着用の採尿バッグです。

特長

- チューブの長さは使用目的に応じてカットすることが可能です。
- 均等に膨らむ三分割構造で、脚にフィットし、バッグ内の尿の移動が少ない。
- 逆流防止に吹き流し弁を採用しています。
- 片手で開閉操作が可能なワンタッチコック。
- 付属の固定用ベルトで大腿や下腿に固定できます。
- 装着感の良い裏地を採用しており、ムレにくい設計です。

* 保険請求不可

製品名	製品番号	容量	入数	JANコード
ユーシン レッグバッグ	SLE10B-005	500mL	10 枚/箱	4580292409034

エチレンオキサイドガス滅菌済

[製造販売元]

[販売業者]



YSM Yushin Medical Co.,Ltd.

株式会社ユーシンメディカル

東京都文京区本郷2-26-3

電話 (03)5844-1415

FAX (03)3815-5782

ユーシン レッグバッグ（逆止弁付 500ML）ご使用方法

① チューブ長の調節

チューブの長さは使用目的に応じてカットすることが可能です。

- 適当な長さで切り調節します。（写真1）


写真1



② コネクタの接続

- 付属のコネクタをチューブへ奥までしっかりと押し込みます。（写真2）
- 軽く引っ張り、コネクタが外れないことを確認します。

写真2

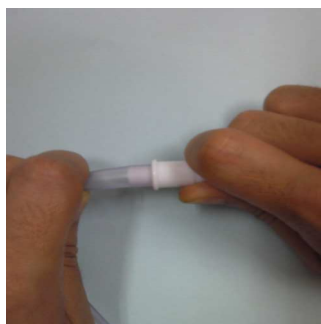

③ 排出口の操作

- 排出口の先をトイレ等に向けてから、矢印方向に排尿コックを指で押し込んでスライドさせ、開放状態（写真3 オープン）で尿が排出されます。
- 排尿コックを矢印方向に指で押し込んで元の位置（写真4 クローズ）にスライドさせて排尿をストップします。

写真3 オープン

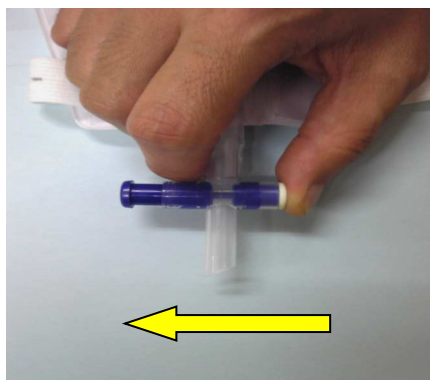


写真4 クローズ

